



PRELEVEMENTS SALIVAIRES

Matériel requis :



Pipette plastique
de 1ml



Tube conique



Milieu de transport

Le prélèvement salivaire doit être réalisé **plus de 30 minutes** après la dernière prise de boisson, d'aliment, de cigarette/e-cigarette, d'un brossage des dents ou d'un rinçage bucco-dentaire.

Il doit être impérativement fait sans effort de toux ni de raclement de gorge. Il est recommandé de recueillir le liquide salivaire après avoir « salivé » plusieurs fois pendant 30 secondes dans la bouche.

Etapes de prélèvement :

1. Identifier à l'aide d'une étiquette identité le tube conique et le milieu de transport.
2. Recueillir au moins 1ml de salive dans le tube conique. Si le patient n'arrive pas cracher (enfants de moins de 3 ans). Prélever le liquide salivaire sous la langue à l'aide de la pipette.
3. Transférer 0.5ml à 1ml de salive à l'aide de la pipette en plastique dans le milieu de transport (la salive doit se trouver entre les 2 traits rouges de la photo ci-dessus).
4. Homogénéiser la salive dans le milieu de transport à l'aide de la pipette.
5. Fermer hermétiquement et décontaminer le tube du milieu de transport.
6. Emballer le milieu de transport et le bon de demande selon les recommandations en vigueur.